

Housse hygiénique inmuRELAX

Peut être désinfectée avec de l'alcool à 70-85% ou peut être lavée jusqu'à une température de 95°C



inmu
touch



Nous vous recommandons de désinfecter inmu et les mains de l'utilisateur avant tout usage

Désinfection et nettoyage

- Le revêtement et le noyau du inmu peuvent être essuyés avec de l'alcool (70-85%), y compris avec une lingette désinfectante.
- Le revêtement et le noyau sont hydrofuges et peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon humide.
- **ATTENTION!** Votre inmu n'est PAS imperméable.

Le lavage de la housse



- La housse hygiénique peut être lavée jusqu'à une température de 95°C. Suivez TOUJOURS les instructions de lavage de ce document.
- Pour que la housse reste propre, elle peut être essuyée avec un chiffon sec après le lavage.

Charger et changer le volume

- Retirez la housse de manière à ce que la prise de chargement soit visible et branchez le câble de chargement.



Vous voyez ici le pli C et le pli A ouverts pendant que l'inmu est en train d'être chargé.

Mettre la housse hygiénique

Notez que la forme de votre inmu est ovale et non circulaire. Pour que la housse soit bien ajustée et qu'elle ne soit pas endommagée, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

Pli A: demi pli



Pli B: Sans logo



Pli C: Avec logo



Regardez la vidéo d'instructions pour mettre la housse hygiénique: <https://youtu.be/ROpDfJAxKI>

Les avantages de la couverture hygiénique inmuRELAX

La surface de la housse peut être désinfectée avec de l'alcool à 70-85%, ce qui permet de protéger facilement l'utilisateur d'inmu contre les bactéries et les virus. Le couvercle hygiénique inmuRELAX scelle l'inmu-core et le protège des liquides et des impuretés.

Les possibilités de stimulation sensorielle tactile de l'inmu étant réduites par l'utilisation de la housse hygiénique, nous recommandons de n'utiliser cette housse qu'en cas d'exigences et de besoins particuliers en matière d'hygiène.

La housse hygiénique peut être utilisée lorsqu'il n'est pas approprié d'utiliser la housse d'origine de l'inmu en raison de la présence de liquides et d'autres salissures (sang, urine, etc.).

Par exemple :

- Chez le dentiste
- À l'hôpital - lorsqu'il y a du liquide et des saletés à proximité, en raison de la présence de virus et de bactéries ou parce que l'environnement doit être stérile.
- En résidence - en raison de la présence de liquides et de saletés, ou de virus et de bactéries, ou parce que plusieurs utilisateurs l'utilisent ensemble, par exemple dans le cadre d'activités.

ATTENTION : Ne pas plonger inmu dans l'eau ni l'asperger d'eau !

Lorsqu'inmu est recouvert de la housse hygiénique il est hydrofuge mais n'est pas imperméable.

ATTENTION : la housse hygiénique ne peut pas être utilisée en même temps que les autres housses. En effet, la housse hygiénique est considérée comme une housse normale.



Nous vous recommandons de désinfecter inmu et les mains de l'utilisateur avant tout usage!